

**NITRILE BLACK**

Prodotto importato da: REA: PR-159470  
e distribuito da: SOCIM S.p.A.  
Via Tovini, 72/74 - 25021 Bagnolo Mella (BS) Italy  
www.socim.it

CE 0465 - D.P.I. di III Cat. ai sensi Direttiva 89/686/CEE e succ. agg.  
Dispositivo Medico di Classe I non sterile ai sensi Dir. 93/42/CEE e 2007/47/CEE

HEAVY DUTY PROTECTION

Contatto alimentare per ditta industriale / food contact for industrial use

TIPOLOGIA DI ALIMENTO / FOODS	SI/YES	NO
ACQUOSO / AQUEOUS	●	
ACIDO / ACID	●	
ALCOOLICO FINO A 10° (V/V) / ALCOHOLIC	●	
GRASSO ED OLEOSO OIL AND/OR FATTY	●	
SECCO / DRY	●	

Contatto alimentare continuo 30 minuti  
(Reg. CE 1935/2004, DM 21/03/73 D.P.R. 777/82)

LOT

Data di produzione / Date of production

Validità 5 anni / 5 years shelf life

Made in Malaysia

EN 420 EN 388 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type B

EN 420 EN 388 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016/Type B

0000 5 GKL

WATER

PRODOTTO MONOUSO AQL 1.5

CONFEZIONE RICICLABILE

IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### GUANTO DA ESAMINAZIONE IN NITRILE SENZA POLVERE – NON STERILE

**CODICE PRODOTTO: 33130**

**NOME COMMERCIALE: Nitrile Black**

**PRODOTTO:** Guanto in nitrile, monouso, non sterile, privo di polvere lubrificante, clorinato internamente, forma anatomica, super resistente, ambidestro, microruvido sulle dita, polso con bordino arrotolato, manichetta standard.

**MATERIALE:** Gomma nitrilica

**UTILIZZO:** Protezione da agenti biologici, contatto accidentale con sostanze chimiche, idoneo all'uso ospedaliero e ambulatoriale per esame, terapia, diagnostica, laboratorio. Adatto per lavorazioni alimentari, cleaning, industria chimica, officine, in elettronica, nel settore estetico.

**COLORE:** Nero

**MARCATURA CE:** DPI III<sup>^</sup> Cat., DM 1<sup>^</sup> Classe

### DIMENSIONI:

TAGLIA	LARGHEZZA PALMO (mm)	LUNGHEZZA (mm)
<b>S (6/6,5)</b>	85 ± 5	min. 240
<b>M (7/7,5)</b>	95 ± 5	min. 240
<b>L (8/8,5)</b>	105 ± 5	min. 240
<b>XL (9/9,5)</b>	110 ± 5	min. 240

### SPESSORE:

POSIZIONE MISURAZIONE	SINGOLA PARETE
Dito	min. 0,13
Palmo	min. 0,11
Polsino	min. 0,08

**CARATTERISTICHE FISICHE:**

	<b>PRIMA DEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO</b>	<b>DOPO IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO</b>
<b>Resistenza alla trazione (MPa)</b>	min. 14	min. 14
<b>Carico di rottura (Newton)</b>	medio 11.2	medio 10.5
<b>Allungamento (%)</b>	min. 500	min. 400

**IMBALLO:** 100 pz/box , 10 box/cartone , 1000 pz/cartone

**PROTEINE DEL LATTICE:** assenti. I guanti sono privi di componenti del lattice (Latex free) quindi indicati per utilizzatori sensibili alle proteine del lattice e indicati nei reparti latex free.

**LIVELLO POLVERE:** 0,46 mg/guanto

**SISTEMA LUBRIFICANTE:** Il guanto 33130 è privo di polvere lubrificante. La clorinatura interna consente un utilizzo agevole anche nel caso di mani umide o bagnate. L'assenza di amido di mais consente l'utilizzo anche ai soggetti che soffrono di allergia a questa polvere.

**AQL:** 1.5

**MARCATURA CE:** **Dispositivo medico di Classe I** (Dir. 93/42/CEE – D.Lgs. 24/2/1997 n. 46 emendato con D.Lgs. 25/01/2010 n. 37 – Recepimento Direttiva 2007/47/CE;

**CONFORMITA':** **UNI EN 455 -1-2-3-4** (AQL per assenza di fori, specifica dei requisiti, proprietà fisiche, protezione da contaminazione, etichettatura, confezionamento, metodi di prova da utilizzare, durata e conservazione).

**UNI EN 420** requisiti generali (specifiche e procedure per progettazione e costruzione, resistenza dei materiali di fabbricazione alla penetrazione d'acqua, innocuità, comfort ed efficienza, marcatura)

**UNI EN 388** (requisiti di protezione contro aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasioni, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto).

**UNI EN 374-1-2-3** (guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi).

**EN 420 – requisiti generali (conforme)****EN 388 – rischio meccanico**

<b>Resistenza all'abrasione:</b>	<b>0</b>
<b>Resistenza al taglio da lama:</b>	<b>0</b>
<b>Resistenza allo strappo:</b>	<b>0</b>
<b>Resistenza alla perforazione:</b>	<b>0</b>
<b>Destrezza:</b>	<b>5</b>

**EN 374 parte I – requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro prodotti chimici e/o microrganismi. (conforme)**

**EN 374 parte II - rischio microbiologico**

**Prova di perdita d'aria** Il guanto supera la prova di perdita d'aria

**Prova di perdita d'acqua** Il guanto supera la prova di perdita d'acqua

**EN 374 parte III - rischio chimico**

	<b>Livelli di prestazione</b>	<b>Codice</b>
<b>Sodio idrossido soluzione al 40%</b>	2	K
<b>Acido solforico soluzione al 96%</b>	2	L
<b>Dietilammina</b>	2	G

**CONTATTO ALIMENTARE:** Idoneo

**Tiuram mix:** assenti.

**Validità del guanto:** La durata di un guanto da esame in nitrile senza polvere è di 5 anni, se vengono rispettate le istruzioni di stoccaggio.

**Condizioni di conservazione:** Tenere lontano da luce solare diretta, conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.

**Istruzioni d'uso:** Il guanto non è progettato per essere pulito o lavato ma per uso singolo.

**Precauzioni:** Prima dell'uso controllare che il dispositivo non presenti fori, difetti o imperfezioni, in caso di dubbio gettare il guanto e sostituirlo.

Evitare il contatto diretto di eventuali sostanze chimiche con la pelle, anche se la sostanza è definita inoffensiva. I guanti sono progettati per protezione da schizzi accidentali o per un breve contatto. In caso di contatto accidentale di qualsiasi sostanza con la pelle lavare abbondantemente con acqua. Rimuovere e gettare il guanto subito dopo il contatto con sostanze chimiche. Assicurarsi che le sostanze chimiche non entrino a contatto con la pelle tramite il polsino. I guanti non devono essere utilizzati laddove venga richiesta una protezione dal rischio meccanico o termico.

**Smaltimento:** Il guanto può essere incenerito o seppellito in discariche controllate, senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente. Le eventuali limitazioni all'eliminazione dipendono unicamente dal tipo di contaminazione a cui è stato sottoposto.